



Gゼロインソール  
品番：GZ19-L

輸入販売元  
協和工業株式会社  
SINCE 1956  
〒06-6471-3539  
大阪府大阪市西淀川区佃1-24-11  
受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日、夏期及び年末年始休業日を除く)



品番表示  
本体：TPU  
生地：ポリエスチル

**お手入れ** お手入れは中性洗剤で手洗ひしたあと、乾いた布で水気をふき取り自然乾燥させてください。ソール-乾燥機は避けください。  
**ご注意** ●本製品は歩行時、作業時において足裏に受ける衝撃を軽減するものですが、衝撃をなくすものではありません。足に障害のある方は、使用前に医師にご相談ください。  
●靴にあらかじめソールを選んでください。●使用する靴に着脱可能なソールがついていない場合は取り外してお使いください。●血行障害・糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・皸裂がある方は、医師にご相談の上で使用してください。●汚れた場合は中性洗剤で手洗ひしたあと、乾いた布で水気を拭き取り、陰干ししてください。●破損・変形したものは使用しないでください。●商品やパッケージは予告なく仕様変更することがございますのでご了承ください。

△注意 切りすぎにご注意ください。

①インソールをシューズに挿入してください。  
②インソールが大きい場合は、裏面の線を目安に少しずつカットし、シューズに合うように調整します。

### インソールのご使用方法

浮いているような感覚!

# まるで無重力

## Gゼロインソール G-ZERO INSOLE

男女共用タイプ Lサイズ 25~28cm フリーカット

Gゼロクッションと同じ  
素材をインソールに使用!



衝撃を吸収し、体の  
重心バランスが取りやすい  
**Gゼロジェル**

菌の繁殖を抑え臭いを抑える  
**抗菌防臭加工**

踏み心地が気持ちいい  
つぶつぶ設計  
**すべり止め仕様**

こんな人におすすめ!

